

## 产品型号 Product Model

| 产品型号                 | 产品规格                    | 产品描述                                                                              |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FWS-WJ-005A (半月板刨刀)  | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 无齿设计，广泛用于各种清创手术，相对于其他有齿刨刀切除力稍弱，主要用于半月板和软骨的清除。                                     |
| FWS-WJ-005B (强力滑膜刨刀) | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 用于各种滑膜切除术，内刀锐利的咬齿特别适用于快速切除滑膜、软骨等。                                                 |
| FWS-WJ-005C (滑膜刨刀)   | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 内刀双窗口设计，切割窗口上斜型锐齿。内刀锐利的咬齿特别适用于滑膜，相对于标准刨刀撕咬更为频繁，能快速有效的切除坚硬韧带组织；外刀无齿，以便在刨刀进入时保护关节腔。 |
| FWS-WJ-005D (超强双齿刨刀) | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 内外刀均有齿，贴合得更加紧密，切除膝关节及肩关节软组织时效率更高，对半月板及皱襞尤其有效。                                     |
| FWS-WJ-005E (全半径切骨刀) | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 大切割窗口适合对于高功率切割后的水流及组织吸出。锐利、光滑的内鞘边缘，适合肩峰下囊性组织及骨髓组织有效的切除。                           |
| FWS-WJ-005F (须状刨刀)   | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 最小切割功率的刨刀，小切割窗口在外刀并限制吸入物，抛光软骨表面，为有效软骨清创而设计，适合细微片状组织的切除。                           |
| FWS-WJ-005G (切刀)     | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 半月板及软骨修整设计。光滑的内、外鞘边缘帮助形成组织的光滑面。大开口的设计有助于促进软骨、半月板的切除及ACL/PCL的切断。                   |
| FWS-WJ-005H (内齿刨刀)   | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 外刀光滑、内刀有齿，刨刀合并有齿样内刀帮助抓取及切除磨损组织，用来切除皱襞、关节软骨损伤、半月板和滑膜。                              |
| FWS-WJ-005I (强力双齿刨刀) | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 内外刀均有齿，包括宽的末端切割窗口，切割组织更加快速有效，便于大范围的组织切除，特别是关节软骨。                                  |
| FWS-WJ-005J (超强双齿刀)  | 3.5MM<br>4.5MM<br>5.5MM | 内外刀均有齿，切割组织更加高效，且不易发生堵塞。                                                          |

一次性使用无菌关节镜刨刀

Disposable Sterile Arthroscopic Planer




重庆富沃思医疗器械有限公司  
CHONGQING FWS MEDICAL DEVICES CO.,LTD.

注册(生产)地址：重庆市北碚区京东方大道399号18幢  
通讯地址：重庆市南岸区南坪万达广场2号写字楼16-10  
电话：023-62977858 传真：023-62606118-805  
邮编：400060 网址：www.fws-china.com

# 一次性使用无菌关节镜刨刀

Disposable Sterile Arthroscopic Planer

一次性使用无菌关节镜刨刀是一种用于旋转切割的设备耗材，它可以用于关节镜和腔镜下切除软组织和骨质，切除的组织可通过刀头内的吸引器从手术部位吸出。

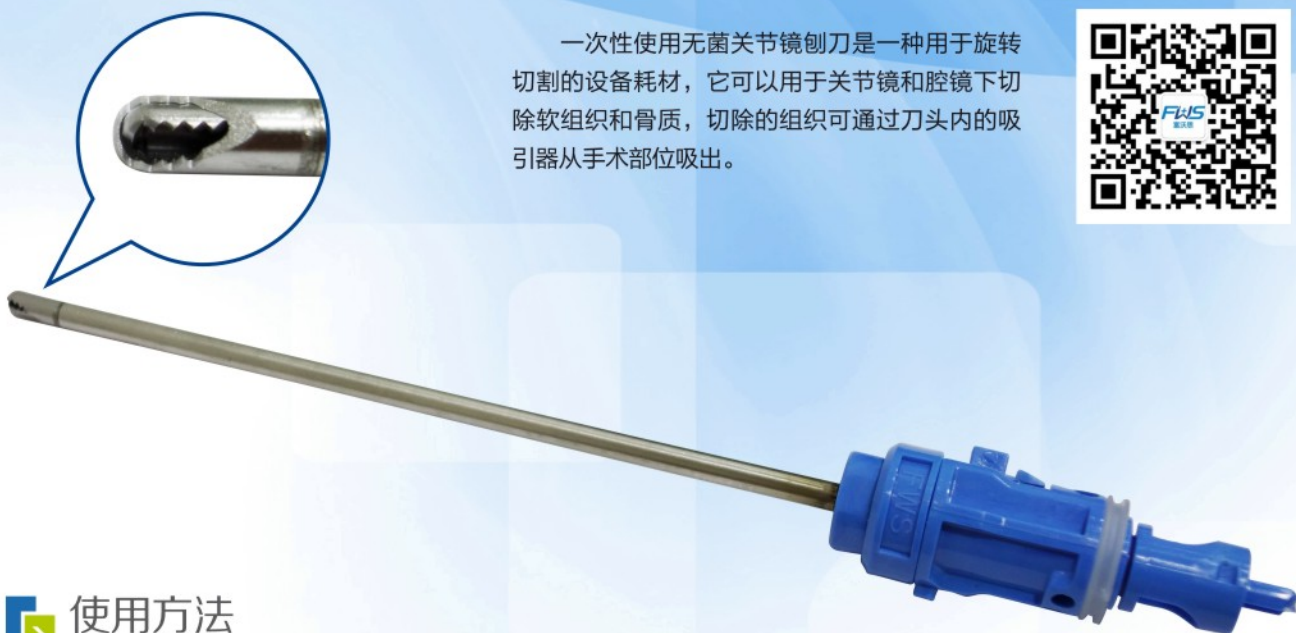

## 使用方法 Method Of Use

- 1、术前，在手术室内拆开一次性使用无菌关节镜刨刀包装备用；
- 2、麻醉、清洁皮肤；
- 3、根据不同关节和手术目的在关节特定部位用灌注吸引针穿刺并达到指定位置；
- 4、注入适量生理盐水，使关节腔或者其他手术区域膨起；
- 5、根据不同关节和适应症选择合适的入路，插入关节镜到达指定位置，观察病灶或者组织状态；
- 6、将一次性使用无菌关节镜刨刀与有源器械连接并确认连接正确，有效；
- 7、根据不同关节和适应症选择正确入路插入刨刀；
- 8、将刨刀刀口对准需刨削、吸引的病灶或者组织按手术需求进行适当刨削。



### 适应症 | Indications

本品与有源器械连接，在关节镜手术中刨削、吸出损伤、游离的组织或者病灶，适用于在各种大、小关节腔内切除软组织和骨质。



### 禁忌症 | Contraindications

1、全身或局部的感染性疾病的患者；如感染、皮肤附近长疖肿等。2、关节僵直、关节骨性强直患者等不适应关节镜手术的患者。3、出血性疾病患者，如血友病等。4、关节周围软组织化脓性炎症，而尚未破击关节腔的患者。5、有严重的高血压、心脏病、糖尿病、或者其他严重疾病，患者不能耐受麻药和手术的情况。